



درمان زخم و محصولات مصرفی فاپسکو

دستگاه های وکیوم تراپی و درمان زخم فاپسکو

شرکت مهندسی فن آور پویا سپاهان ، فعال در زمینه تولید تجهیزات پزشکی ،
ساکشن های بیمارستانی ، وکیوم تراپی هوشمند



FAPSCO
Medical Device

فاپسکو



دستگاه وکیوم تراپی مدل VACUUMED V.A.C

دستگاه وکیوم تراپی "فپسکو" فشار منفی ثابت و کنترل شده ای را از صفر تا ۲۰۰ میلی متر جیوه ایجاد می نماید. با استفاده از فوم و ایجاد محیط خلا بسته با کمک پانسمن فیلم شفاف چسبنده و درن سیلیکونی، فشار منفی به سطح زخم منتقل شده و در نهایت ترشحات زخم در مخزن متصل به دستگاه جمع آوری می گردد.

• مجهز به سیستم هوشمند هشدار و نمایشگر LCD

• دارای آداپتور و باتری

• دارای سه مد کاری: پیوسته، متناوب و داینامیک

• دارای مخزن ۵۰۰ سی سی

+3

دارای سه مد کاری: پیوسته، متناوب و داینامیک

+15

بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه تولید دستگاه های خلا، وکیوم تراپی و ملزومات

گزارشات مروری درمان با وکیوم تراپی

جنسیت: مرد | علت: تروما و شکستگی | سن: ۳۹ سال | طول دوره ی درمان : ۷۰ روز

2/2/1394



14/2/1394



4/5/1394



جنسیت: مرد | علت: افتادن جسم خارجی روی پا | سن: ۴۵ سال | طول دوره ی درمان : ۲۵ روز

Primary Wound



2/10/1395



5/10/1395



جنسیت: زن | علت: آبسه در ناحیه ساق پا | سن: ۸۰ سال | طول دوره ی درمان : ۱۸ روز

Primary wound



21/9/1395



29/9/1395




ویژگی های دستگاه لمس هوشمند فرآیند درمان

درمان زخم با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و کیوم تراپی و به کارگیری پمپ همراه با سیستم میکروپروسسور با اعمال فشار منفی کنترل شده و تکنیک پانسمان خلا، سبب کنترل تعداد باکتری ها، جمع آوری ترشحات و تسریع بهبود زخم های حاد و مزمن می گردد.


مد متناوب (Intermittent)

در این مد ابتدا دستگاه، فشار منفی را به میزان حداکثر تنظیم شده توسط کاربر می رساند و سپس بر اساس زمان انتخابی به حالت استراحت بازمی گردد. در این حالت نیز بیمار دردی احساس نمی کند.

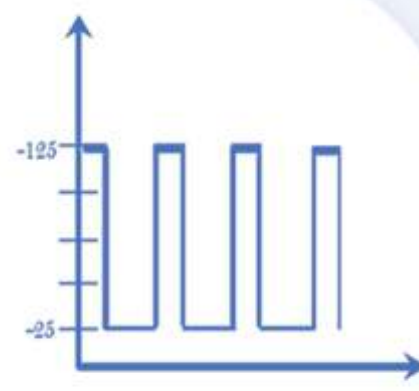


مد پیوسته (Continuous)

در این مد ابتدا پمپ روشن شده و بلافاصله میزان فشار منفی بستر زخم را به مقدار تنظیم شده توسط کاربر می رساند. و به دلیل مکانیزم بدون درد به کار گرفته شده در این مد، از همان لحظات ابتدایی بیمار هیچگونه دردی احساس نمی کند.

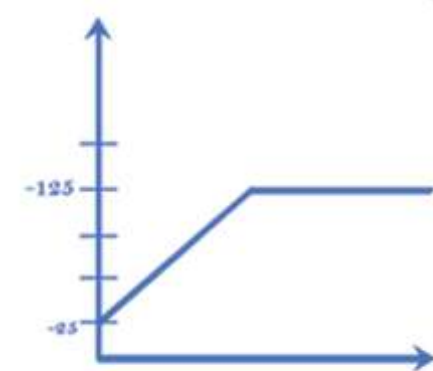


مد دینامیک پیشرفته (DPCA)

این مد، مدل تکامل یافته ی مد دینامیک است. در این حالت کاربر قابلیت تنظیم زمان استراحت و زمان تناوب را دارد، در نتیجه این حالت با اثربخشی بالا، هیچ دردی را ایجاد نمی کند.

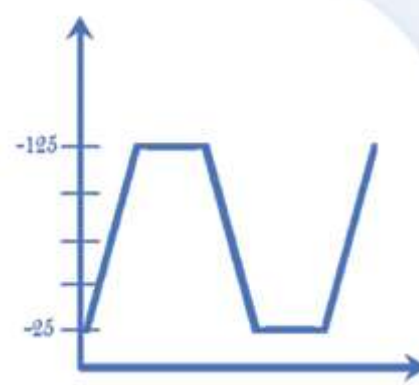

مد دینامیک (DPC)

این مد، مدل تکامل یافته ی مد متناوب است. در این حالت پمپ چرخه های منفی ثابتی از فشار منفی را به بستر زخم اعمال می نماید. به دلیل کاهش انقباض و انبساط فوم، بیمار هیچ دردی را تجربه می کند.

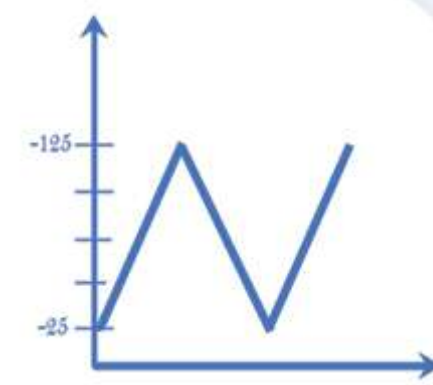


فوم پلی اورتان (Polyurethane Foam)

فوم از جنس پلی اورتان با منافذ باز می باشد، که در اندازه های مختلف، ضد حساسیت، غیر چسبنده به بستر زخم، زیست سازگار و آبگریز است، که با توزیع یکسان فشار منفی در بستر زخم امکان رشد بافت های گرانوله و خروج ترشحات را فراهم می نماید.



شستو شوی زخم (Wound Irrigation)

هدف از شست و شو، هموارسازی روند دبریدمان و سرعت بخشیدن به روند بهبود زخم می باشد. این روند کاملاً هوشمند بوده و در عین حال می تواند توسط اپراتور از راه دور نیز کنترل شود.

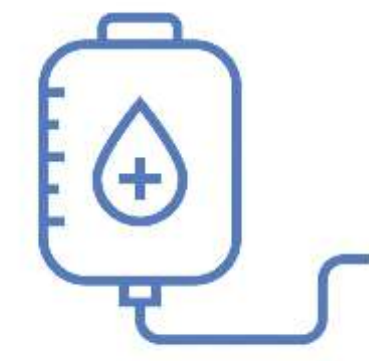



وکیوم تراپی هوشمند مدل Hyper Mid

دارای سه مد کاری : پیوسته ، متناوب و داینامیک
مجهز به سیستم بدون درد در تمامی مد های کاری

دستگاه قابل حمل و سبک ، نمایشگر لمسی ۳.۲
اینچی ، ابعاد دستگاه : ۸ * ۱۵ * ۱۸ cm

مجهز به سامانه ارسال هشدار و عیب یابی آنی
سامانه هشدار لیکیج و بلاکیج و هشدار پر شدن مخزن

1 kg

سبک و بی صدا ، شارژدهی ۱۵ ساعته
حجم مخزن: ۵۰۰ CC



وکیوم تراپی هوشمند مدل Hyper

دارای ۴ مد کاری : پیوسته ، متناوب ، داینامیک و داینامیک پیشرفته
مجهز به سیستم بدون درد در تمامی مد های کاری

نمایشگر لمسی ۷ اینچی ، قابلیت اتصال به WiFi
مجهز به سیستم ردیابی و GPS

مجهز به سامانه ارسال هشدار و عیب یابی آنی
سامانه هشدار لیکیج و بلاکیج و هشدار پر شدن مخزن

2.5 Kg

سبک و بی صدا ، شارژدهی ۷ ساعته
حجم مخزن: ۷۵۰ CC

اطلاعات تماس

با ما در ارتباط باشید ...

شرکت مهندسی فن آور پویا سپاهان ، با نام تجاری فاپسکو ، فعال در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و کیوم تراپی زخم و همچنین دستگاه های زیبایی می باشد .

دفتر مرکزی: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ، ساختمان فاپسکو
دفتر تهران: خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان هفتم ، پلاک ۷



www.fanavarco.com

FanavarPouyaSepahan@gmail.com



اصفهان : ۰۹۱۳۳۱۸۱۴۳۱ _ ۰۱۴-۱۸ _ ۰۳۱۳۳۹۳۲

تهران : ۰۲۱۸۸۵۲۵۷۷۴ _ ۰۹۱۲۹۰۵۸۴۹۷

